


Positioneringskuddar Immedia LeanOnMe

Enkel guide trycksårsförebyggande positionering

Bassortiment RJL

Orsaker till trycksår

- Tryck
 - Utstickande benpartier →
- Skjuv
- Friktion
- Värme
- Fukt
 - Blöta kläder, inkontinensskydd, sängkläder

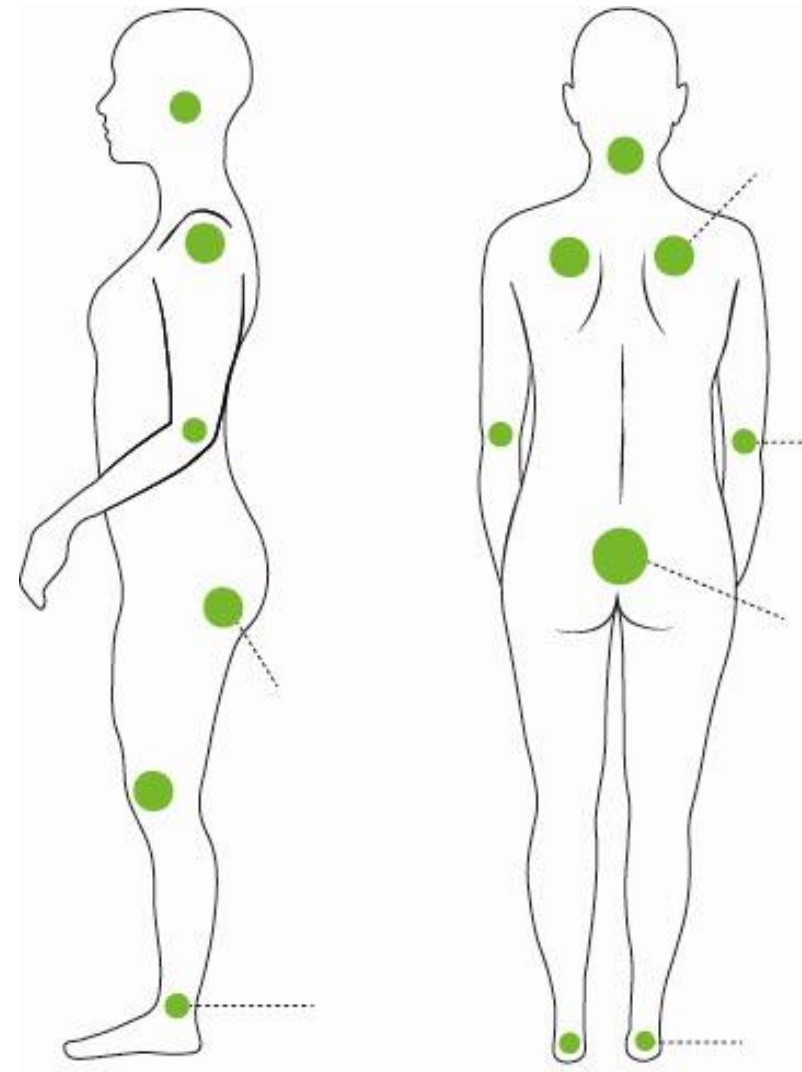

Principer för positionering vid förebyggande av trycksår

Bedömning, åtgärd, uppföljning, utvärdering och dokumentation



Undvika tryck

- Ändra läge ofta – vändschema kan vara till hjälp
- Avlasta och fördela trycket



Undvika skjuv

- Stabila och trygga positioner
- Fylla ut "hålrum"



Undvika värme/fukt/friktion

- Bädda med få lager och håll miljön i sängen torr
- Se till att kläder och sängkläder är släta

Få kuddar – många positioner!



Stödkudde LeanOnMe Basic M B500xL700 mm inkl Soft-Touch överdrag	IM15103
Stödkudde LeanOnMe Basic L B250xL900 mm inkl Soft-Touch överdrag	IM15104
Stödkudde LeanOnMe Basic LW B450xL800 mm inkl Soft-Touch överdrag	IM15105
Stödkudde LeanOnMe Channel kanalsydd B750xL750 mm inkl Soft-Touch överdrag	IM15108
Nackkudde LeanOnMe Ring S Ø400 mm inkl Soft-Touch överdrag	IM15110
Stödkudde lång LeanOnMe Roll L B330xL2300 mm Soft-Touch överdrag	IM15113

Viloläge sida - rygg




Stödkudde lång LeanOnMe Roll L B330xL2300
mm Soft-Touch överdrag **IM15113**

Längs baksidan kroppen
Ev. mellan knän



Stödkudde LeanOnMe Basic M
B500xL700 mm inkl Soft-Touch överdrag
IM15103

Ev. i famnen

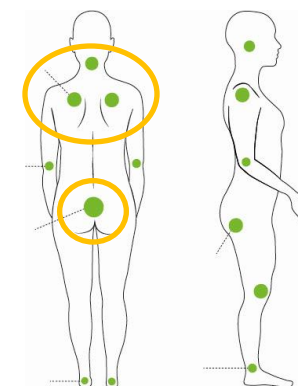


Viloläge sida –mage

Stödkudde lång LeanOnMe Roll L B330xL2300
mm Soft-Touch överdrag **IM15113**



Längs/runt
framsidan
kroppen
Ev. mellan
knän

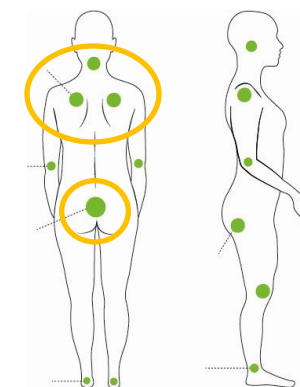

Aktivt stabilt läge rygg – alternativ 1




Stödkudde lång LeanOnMe Roll L B330xL2300
mm Soft-Touch överdrag **IM15113**

Runt överkroppen

Stödkudde LeanOnMe Channel kanalsydd B750xL750
mm inkl Soft-Touch överdrag **IM15108**

Under knän och ben

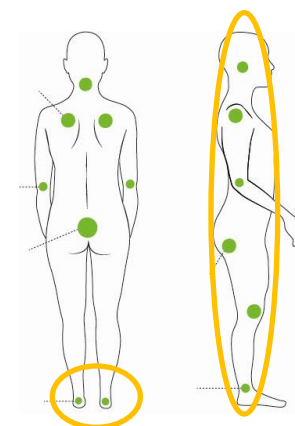

Aktivt stabilt läge rygg – alternativ 2



Stödkudde lång LeanOnMe Roll L B330xL2300 mm Soft-Touch överdrag **IM15113**

Runt överkroppen



eller



Stödkudde LeanOnMe Basic LW B450xL800 mm inkl Soft-Touch överdrag **IM15105**


Under knän och ben

Stödkudde LeanOnMe Basic M B500xL700 mm inkl Soft-Touch överdrag **IM15103**



Stödkudde LeanOnMe Basic L B250xL900 mm inkl Soft-Touch överdrag **IM15104**


Under anklar

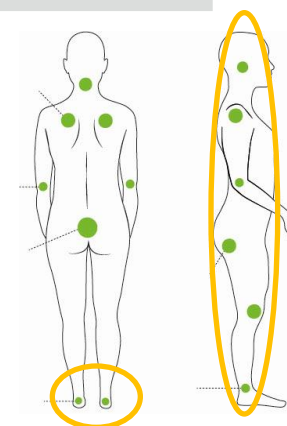

Fokusområde hälar



Stödkudde LeanOnMe Channel kanalsydd
B750xL750 mm inkl Soft-Touch överdrag
IM15108

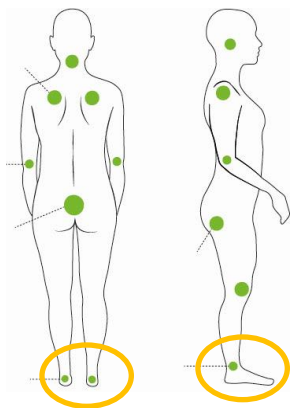

Mellan ben sida



Vikt i kanal under knän



Kanaler längs med ben

Fokusområde bakhuvud/öra




Nackkudde LeanOnMe Ring S
Ø400 mm inkl Soft-Touch
överdrag **IM15110**



Bakom huvudet



Runt nacken

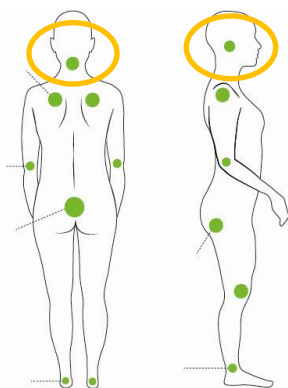

Runt sidan huvud/öra



Runt sidan huvud/öra med stöd

Sammanfattningsvis

- Riskzon? Vänta inte – börja positionera direkt
 - Fördela trycket och byt läge ofta
 - Stabila positioner
 - Slät och torr miljö i sängen
-
- Gör det enkelt, använd få kuddar till olika positioner

Vid frågor välkommen att kontakta:

Inger Skärin

inger.skarin@etac.com

Mobil 073-075 54 25